

Instrukcja
pobrania materiału
do badania DNA

Materiał pobieramy dwie godziny po posiłku lub po wcześniejszym przeplukaniu jamy ustnej wodą.



Najpierw dokładnie myjemy ręce,
następnie bezwzględnie zakładamy do zestawu rękawiczki.

Ostrożnie wyjmujemy wymazówkę z próbówki.

!Uważamy by nie zanieczyścić bawelnianego aplikatora materiałem biologicznym niepożądanego osoby!



Przez 10 sekund nieustannie pocieramy wewnętrzną stronę policzka wymazówką tak by zebrać na nią jak najwięcej komórek nabłonka.

Aby pobrać więcej materiału trzymamy wymazówkę za plastikowy patyczek, a nie za żółty korek.





Analogicznie postępujemy podczas pobierania wymazu od pozostałych osób biorących udział w badaniu.

Pozostawiamy wymazówki w czystym miejscu do wyschnięcia. Zwracamy szczególną uwagę by wymazówki podczas suszenia nie stykały się ze sobą.
!Nieostrożność na tym etapie może zafalszować wynik badania!



Umieszczamy wymazówki w odpowiadających im probówkach i wraz z wypełnionym formularzem i podpisanym oświadczeniem odsyłamy niezwłocznie do Laboratorium.

